

Linea Fast Therapy

CREMA FLUIDA PER DIATERMIA AD ALTO SCORRIMENTO 1000 ML

Alternativa alla Crema per Trattamenti Elettromedicali, con una composizione che permette di avere un prodotto PIU' fluido per l'uso della Diatermia.



OMEOVITA FAST THERAPY CREMA FLUIDA PER DIATERMIA

Indicazioni: Crema conduttrice fluida per trattamento capacitivo e resistivo.

La crema conduttrice è assolutamente necessaria per l'uso dell'apparecchiatura durante il trattamento diatermico.

Possiede un elevato potere conduttivo e favorisce il rendimento ottimale nella fase di trattamento capacitivo e resistivo.

Modalità d'uso: applicare sulla superficie dove verrà fatto scorrere l'elettrodo capacitivo e resistivo. Per un efficace esecuzione del trattamento, applicare una dose di prodotto anche sull' elettrodo di ritorno a manipoles o a piastra. Se si dovesse verificare una certa resistenza durante il movimenti dell' elettrodo, aggiungere altra crema per agevolare la continuazione della terapia.

Misure	Imballo	Codice
1000 ml	9 Pz.	OM204